


## Mode d'emploi des Lames de laryngoscope VITAL VIEW™

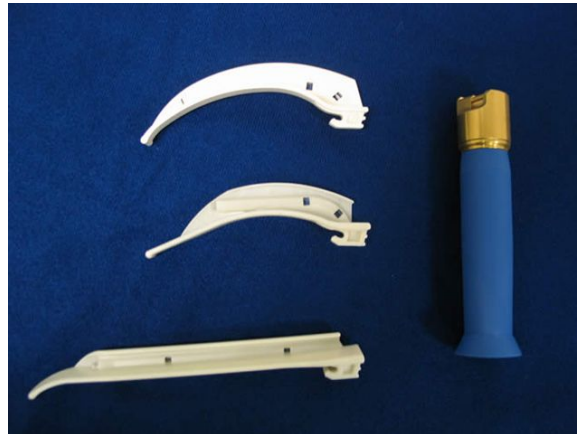

### Lames de laryngoscope VITAL VIEW™

#### *Mode d'emploi :*

*A utiliser exclusivement avec les manches de laryngoscopes Vital View™*

1. Ouvrir l'emballage en polyéthylène de la lame au niveau du talon de la lame et découvrir suffisamment celle-ci pour la monter sur le manche.
2. Monter le talon du manche sur l'axe d'articulation.
3. Soulever et engager la lame. Vérifier l'illumination.
4. Replacer la lame en position d'attente. Retirer le polyéthylène de la lame avant l'intubation.
5. Mettre la lame au rebut conformément aux pratiques hospitalières standard.

### SAFE SAC™ VITAL VIEW™

#### Protège-manche de laryngoscope

#### *Mode d'emploi :*

*A utiliser exclusivement avec les manches de laryngoscopes Vital View™*

1. Insérer l'extrémité renflée du manche de laryngoscope entre la bande plastique blanc et la couche plastique montée sur la feuille de protection en papier.
2. Tout en maintenant la bande de plastique blanc et la feuille de protection en papier, décoller la bande plastique bleu et la feuille de protection et la séparer du protège-manche SAFE-SAC™.
3. Tout en maintenant le laryngoscope, séparer le feuille de protection en papier blanc du protège-manche SAFE-SAC™.
4. Monter la lame du laryngoscope sur un manche de laryngoscope pour pouvoir perforer le protège-manche SAFE-SAC™.